

# **Roll'nGo**



**Roll'nGo**


**info@rollngo.nl**  
**[www.rollngo.nl](http://www.rollngo.nl)**

# Gebruikershandleiding model "standaard"

Wij willen u bedanken voor het kopen van het model "standaard".  
Het is belangrijk dat u eerst de handleiding leest voor gebruik.

## 1. Goedkeuring van de rollator

Deze rollator is EEC –goedgekeurd.

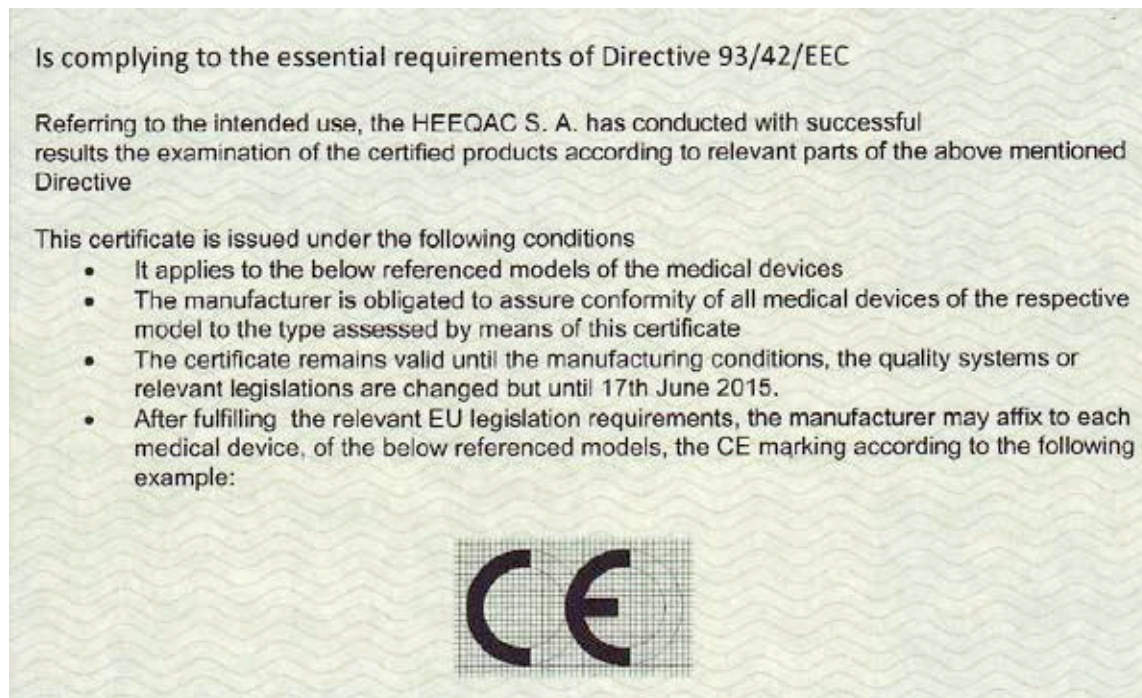

## 2. Gebruik van de rollator

Het maximum gebruikersgewicht voor deze rollator is 100 kg. De rollator kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. U kunt gaan zitten op de rollator en hij is voorzien van een mandje.

Zorg ervoor dat u het mandje niet te zwaar laadt, dit kan ervoor zorgen dat de rollator voorover valt. Gebruik de rollator op solide en egaal wegdek.

*Het gebruik van de rollator voor andere doelen zoals bijvoorbeeld als sta-op hulpmiddel of voor het vervoeren van zware lasten wordt sterk afgeraden en is zeer gevaarlijk.*

Personen met verminderde loopafstand, met balans storingen of met andere storingen die een normale staande en lopende houding niet toestaan, kunnen met behulp van deze rollator de persoonlijke loopafstand aanzienlijk verhogen of tenminste de mobiliteit verbeteren.

## 3. Bediening / Aan de slag

- Om de handvatten op hoogte te stellen maak de vergrendeling los van de beide zijden van de stalen buis.
- Pas de hoogte aan door aan de handgrepen omhoog of omlaag te stellen tot in de juiste positie en vergrendel de vergrendelknoppen zo strak als u kunt.
- Zorg ervoor dat de handgrepen zijn aangepast tot een hoogte, zodat u een comfortabele houding heeft.
- Zorg ervoor dat het frame volledig wordt geopend met de vergrendeling vergrendeld in de open positie.
- Zorg ervoor dat het remmechanisme wordt getest voor elk gebruik.
- Het dienblad kan worden bevestigd op de zitting indien nodig. Onder de lade zijn er 4 pinnen die passen in de 4 gaten in de zitting om het dienblad stevig op zijn plaats te houden.
- Het mandje kan worden bevestigd op de rollator indien gewenst door het inhaken van de mand op de haken geplaatst onder de zitting.

#### 4. Aanwijzingen voor veilig werken

- Bij gebruik van de rollator moet u zich ervan bewust zijn dat de stabiliteit afhangt van de vier wielen die in contact met een vlak oppervlak komen.
- Voorzichtigheid is geboden bij gebruik over een oneffen ondergrond, hellingen en stoepranden. De stabiliteit zal onvermijdelijk worden verminderd.
- Zorg ervoor dat het frame volledig wordt geopend met de vergrendeling in de open positie.
- Zorg ervoor dat de handgrepen zijn aangepast op gelijke hoogte beide kanten en veilig vergrendeld.
- Bij het zitten op de zitting ervoor te zorgen dat u gaat zitten in het midden.
- De rollator kan alleen worden gebruikt één persoon tegelijk. Sta niet toe dat een gebruiker worden geduwd zittend op de rollator.
- Pas op voor natte vloeren binnen en buiten gevaren zoals sneeuw, bladeren en ijs.
- Gebruik de rollator alleen als loophulpmiddel.
- Zorg bij het gebruiken van de rollator op een hellend vlak altijd dat u de remmen gebruikt.
- Op hellende vlakten kan de rollator sneller naar beneden rijden dan de loopsnelheid op dat moment. U kunt dan vallen.
- Hel de rollator nooit over naar de zijkant. De rollator kan dan omvallen. De maximale kantelhoek is 5 graden.
- Oefen nooit te zware druk op de handvatten aan de achterkant uit. De rollator kan naar achteren kantelen.
- Let bij het samenkappen van de rollator altijd op kledingstukken of lichaamsdelen die bekneld kunnen raken.
- Gebruik de mand alleen voor boodschappen en zorg ervoor dat de mand niet zwaarder is dan max.5 kg.
- Het wordt sterk afgeraden tassen of andere voorwerpen aan de duwhandvatten aan de achterkant van de rollator te hangen. De rollator kan dan kantelen.

#### 5. De remmen

De remmen zijn in de fabriek ingesteld op deze rollator en er zijn geen verdere aanpassingen aan gedaan. Als u nodig vindt dat er enkele kleine aanpassingen moeten worden gedaan volg de volgende instructies op: Om de snelheid uit de rollator te halen dient u beide remmen tegelijkertijd omhoog richting de duwhandvatten te bewegen (zie foto 1). Zorg ervoor dat u altijd rustig en geleidelijk remt. Om de rollator op de parkeerrem te zetten dient u de remmen naar beneden te duwen totdat u hoort dat deze vastklikken (zie foto 2). Om de rollator van de parkeerrem af te halen dient u de remmen weer omhoog richting de duwhandvatten te bewegen.



**Waarschuwing; het effect van de remmen kan worden beïnvloed door de staat van de banden en de remkabel, check daarom regelmatig uw remmen.**

## 6. Onderhoud en verzorging

- Een goede verzorging en onderhoud is van belang om uw rollator in een goed werkende staat te houden.
- Zorg ervoor dat uw rollator ten allen tijde gebruiksklaar is, wanneer niet in gebruik opslaan op een droge plaats.
- Ten minste een keer per week: veeg het frame met een schone doek, als de rollator wordt blootgesteld aan vocht, onmiddellijk na gebruik droog.
- Controleer de wielen ten minste één keer per maand en maak schoon met een vochtige doek.
- Controleer of de wielen draaien en dat er geen vuil rondom de as zit.
- Zorg ervoor dat de remmen en remblokken correct werken. Controleer dagelijks de doeltreffende werking van de remmen voordat u de rollator gebruikt.
- Controleer regelmatig of het vergrendelingsmechanisme veilig is.
- Controleer regelmatig de rollator op vervorming, schade, slijtage en corrosie.
- Zorg ervoor dat de rollator alleen wordt gebruikt als hulpmiddel.
- Gebruik voor reiniging een gebruikelijk schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

## 7. Technische informatie

Opvouwbaar

Afneembare mand en dienblad

LxBxH 665x590x780/950mm

In hoogte verstelbaar van 780 tot 950mm

Zithoogte 600mm

Totaal gewicht (inclusief mand en dienblad) 11 kg

Maximum gebruikers gewicht 100 kg

## 18. Garantie bepalingen

Op de door ons verkochte producten geldt standaard 12 maanden fabrieksgarantie, tenzij hieronder anders aangegeven. De garantie geldt niet voor normaal slijtende onderdelen en is niet overdraagbaar op een nieuwe eigenaar. De garantie vervalt wanneer:

- Er sprake is van een defect door onzorgvuldig gebruik
- Er sprake is van onjuist gebruik
- Er sprake is van te hoge belasting (overgewicht gebruiker)
- Er sprake is van vandalisme of diefstal

**Roll'nGo**

**info@rollngo.nl**

**[www.rollngo.nl](http://www.rollngo.nl)**